



V A H L K A M P

HANDLEIDING

Draadloos Bedalarm met mat

Voor meer informatie:



V A H L K A M P

Voor Nederland:

Wilhelminalaan 1, 5707 BS Helmond

Telefoon: 0492- 52 89 75 • Fax: 0492 - 55 36 97

E-mail: info@vahlkamp.nl • Website: www.vahlkamp.nl

Voor België:

Postbus 61, 3960 Bree • Telefoon: 011 - 632 770

STORINGSWIJZER.

Opmerking 1:

Belangrijk is dat de Bedmat niet gevouwen wordt.

Opmerking 2:

Het Draadloos Bedalarm is voorzien van een codenummer (bijv. 35-567). De code achterop de zendunit moet corresponderen met de code achterop de ontvangstunit.

Opmerking 3:

Indien de plug niet aangesloten is op de zendunit kan er geen alarmsignaal doorgegeven worden. Hetzelfde gebeurt als de AAN/UIT-schakelaar in de UIT-stand staat.

Opmerking 4:

Wanneer de zendunit niet gebruikt wordt dient de schakelaar op de UIT-stand te staan in verband met onnodig batterijverbruik

Controleer bij niet functioneren eerst of de pluggen goed bevestigd zijn en de schakelaar op de AAN-stand staat.

Is alles correct aangesloten doorloop dan de volgende punten:

De LED licht niet op bij het inschakelen van de zendunit:
de kleine batterij van de zendunit dient verwisseld te worden.

Er wordt geen alarmsignaal doorgegeven en de batterijen zijn in orde:

Zorg dat het bed leeg is

Zet de zendunit van UIT naar AAN.

Licht de LED twee maal op (lang-kort) dan is de mat beschadigd en dient er contact opgenomen te worden met Vahlkamp.

1. Kennismaking

Zojuist is het Draadloos Bedalarm met mat van Vahlkamp in ontvangst genomen. Bijgaand geven wij een overzicht voor installatie en gebruik, maar eerst zetten wij een aantal voordelen op een rij.

PLUSPUNTEN


Behalve het hoofddoel, het alarmeren via het (bestaande) oproepsysteem indien het bed verlaten wordt, kent het Draadloos Bedalarm de volgende pluspunten:

Instelmogelijkheid tijd.

De intervaltijd tussen het verlaten van het bed en het doorgeven van het signaal aan het oproepsysteem is instelbaar. Deze intervaltijd kent een keuzemogelijkheid tussen direct, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 15 min.

Uitgebreide testmogelijkheid.

- De schakelaar wordt AAN gezet: de LED licht even rood op
- Er wordt contact met de mat gemaakt: de LED licht even rood op
- Het contact met de mat wordt verbroken: de LED gaat gedurende 5 seconden branden. U kunt controleren of de activiteit bij de mat wordt gedetecteerd door de zendunit.

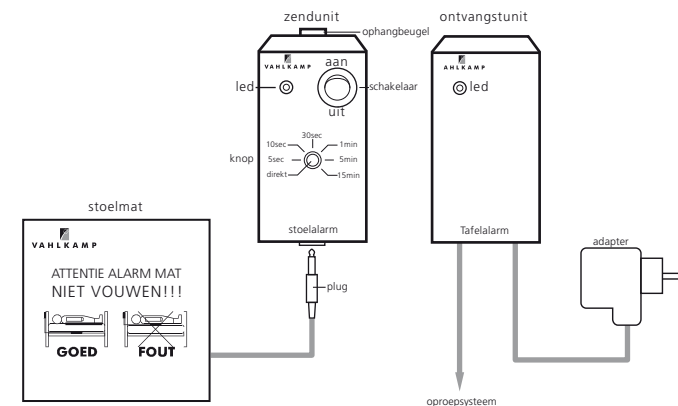

Afbeelding 1: Onderdelen Bedraad Bedalarm met mat

Draadloos Bedalarm met mat

Draadloos Bedalarm met mat

Geen hinderlijke snoeren.

Het Bedalarm is draadloos. Het bed kan daarom 5 à 10 meter van het oproepsysteem verwijderd zijn. Ook lopen er geen hinderlijke snoeren over de vloer.

Onderdelen

Het Draadloos Bedalarm bestaat uit de volgende onderdelen (zie afbeelding 1):

Zendunit, met aan/uit-schakelaar en tijdstelknop.

Ontvangstunit, met 220-240 Volt adapter en kabel voor aansluiting op het oproepsysteem.

Bedmat, ca. 55 x 55 cm. voor onder het matras, met kabel en plug.

2. Installatie

2.1 Ontvangstunit

Bevestig aan de grijze kabel een plug die geschikt is voor uw oproepsysteem, zoals de plug aan de peerbelt of verlengde bel.

De aansluitingen van de grijze kabel zijn als volgt:

- bruin: NO
- groen: NC
- wit: COM

Voorbeeld:

Heeft uw oproepsysteem een maakcontact, sluit dan wit en bruin aan. Bij een verbreekcontact dient u wit en groen aan te sluiten.

Vervolgens dient de ontvangstunit op een vaste plaats aan de muur in de buurt van de oproepaansluiting bevestigd te worden.

Steek de adapter in een 220-240 Volt wandcontactdoos en verbind de plug met het oproepsysteem. De ontvangstunit kan nu het alarm doorgeven aan het oproepsysteem.

2.2 Zendunit

Klem de zendunit met behulp van de beugel aan de achterkant van het bed. Zorg dat de schakelaar op stand UIT staat.

2.3 Bedmat

De Bedmat dient zodanig bij de patiënt / bewoner ONDER het matras gelegd te worden, dat de gebruiker er in het midden op ligt. Verbind vervolgens de jackplug van de mat met de zendunit. Werk de kabel weg zodat de mat geen belemmering vormt bij het opstaan en weglopen van het bed.

De installatie is nu compleet. Het systeem kan zodra alles aangesloten is getest worden.

2.4 Testen

Stel de gewenste intervaltijd in. Houd er rekening mee dat bij gebruik van de directstand het oproepsysteem direct wordt geactiveerd. Wordt deze stand gebruikt bij een patiënt/bewoner die veelvuldig beweegt c.q. omdraait dan bestaat de mogelijkheid dat het oproepsysteem te vaak in werking treedt waardoor een zekere onplettendheid kan ontstaan.

Zet de zendunit AAN. De LED licht even rood op.

Wanneer de patiënt/bewoner het bed verlaat licht de LED even rood op. Na het verstrijken van de ingestelde tijd wordt het oproepsysteem geactiveerd en knippert de LED rood gedurende 5 seconden.

Het Draadloos Bedalarm is na het activeren van het oproepsysteem direct weer gebruiksklaar. U hoeft niets te doen om de alarmfunctie opnieuw te activeren.

N.B. Wanneer de zendunit niet gebruikt wordt dient u de schakelaar in de UIT-stand te zetten in verband met onnodig batterijverbruik.

GARANTIE

Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik van dit product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd.

Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, demontage, brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie vallen niet onder de garantie. Batterijen vallen niet onder de garantie. In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de reparatie zal verzorgen.